

## Fondazione Villa d'Argento Casa per anziani di Silea

Silea (TV)

Residenza per anziani autosufficienti e non autosufficienti, in più nuclei  
92 posti letto complessivi



2018-2021

### MONITORAGGIO LETTI

#### Scendiletto con allarme Caremat

- 4 scendiletto con allarme a pressione
- 1 ricevitore radio con contatto RCJ06 per il collegamento al sistema di chiamata BTicino
- 3 suonerie RCP09

2003

### DOTAZIONE SICUREZZA ALZHEIMER

#### Controllo varchi LOCALIZZA

- 5 bracciali localizzatori S37L per gli ospiti
- 4 segnalatori di rilevamento IS75 ad anello filare (loop) per 3 cancelli e 1 porta d'ingresso
- 1 unità principale NurseCall

## Esigenze

**2018-2021** Nel 2018 emerge la necessità di un sistema di monitoraggio del letto che avverta il personale quando un ospite malato di demenza o con ridotta autonomia si alza durante la notte. Il sistema deve essere collegato all'impianto di chiamata esistente (BTicino).

Nel 2021 occorre ampliare la dotazione di scendiletto con allarme acquisita allora, con 3 ulteriori dispositivi.

**2003** Soluzione di sicurezza per proteggere ospiti affetti da demenza e morbo di Alzheimer, soggetti a *wandering* ed esposti al rischio fuga.

Il sistema deve permettere di monitorare alcuni ospiti allertando lo staff quando si avvicinano ai cancelli e all'ingresso, con il pericolo che escano e si allontanino senza accompagnamento.

Scendiletto allarme CareMat:

- senza fili
- antisdrucchiolo
- igienico
- agevole da spostare grazie alle maniglie
- disponibile in diversi modelli

La piccola suoneria collegata si inserisce in una comune presa di corrente



## Soluzione

Per sorvegliare l'abbandono del letto, i tappeti scendiletto con allarme CareMat sono collegati via radio a una suoneria e al sistema di chiamata: quando l'ospite si alza e poggia i piedi sul tappeto, scatta la suoneria che avverte il personale e la segnalazione giunge anche ai cordless dello staff in movimento.

Dopo il primo tappeto a forma stondata, si è passati in seguito al modello rettangolare: più ampio, si adatta perfettamente all'area di discesa dal letto delimitata dall'apertura della sponda.

La soluzione CareMat completa il sistema integrato di chiamata della Casa, che include anche il controllo varchi via radio LOCALIZZA per allarme antifuga:

- localizzatori a bracciale con cinturino antistrappo per gli ospiti monitorati;
- rilevatori IS75 con anello filare, posato a suolo, per i cancelli e l'accesso principale: quando l'ospite con localizzatore è prossimo al varco pericoloso, l'allarme alla centrale NurseCall visualizza sul display il numero identificativo del bracciale e del varco interessato.

## Vantaggi

- **Efficienza in tempi brevi** grazie alla tecnologia via radio: i sistemi senza fili non richiedono cablaggi e si installano rapidamente, senza onerosi interventi di impiantistica né opere murarie.
- **Praticità:** i tappeti CareMat si collegano via radio a qualunque sistema di chiamata. Sono ideati per letti, poltrone, soglie (disponibili in più versioni). Anche LOCALIZZA si può facilmente trasferire e ricollocare all'interno della struttura, es. in una nuova ala.
- **Razionalità e flessibilità:** queste dotazioni si dimensionano come serve, sono adatte sia per installazioni minime (1 singolo ospite, 1 unico accesso) sia per configurazioni molto estese (centinaia di ospiti, più edifici).
- **Convenienza e validità nel tempo:** LOCALIZZA è un sistema durevole che permette facili espansioni nel tempo, anche in più fasi successive, favorendo una conveniente programmazione degli interventi e dei costi.

### Efficiente dal 2003

Sistema antifuga Localizza:

- bracciale localizzatore S37L
- segnalatore IS75 (abbinato a loop) per i varchi
- unità principale NurseCall

