


Casa di Riposo di Prati - “Schloss Moos” Prati di Vizze/Wiesen (BZ)

Casa di Riposo
48 posti letto complessivi
Ricovero temporaneo
e Centro diurno

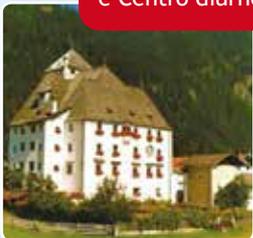

2014

DOTAZIONE SICUREZZA ALZHEIMER

Controllo varchi “Localizza”

- 1 unità principale di chiamata infermiera NurseCall
- 2 segnalatori di rilevamento IS76 con 3 antenne in ferrite su due accessi (porte)
- 3 trasmettitori da polso S37L per gli ospiti monitorati
- 1 trasmettitore di accompagnamento S37E per il personale

Dotazione installata da:
Nicom Secur Alarm S.r.l. di Bolzano

Esigenze

Soluzione di sicurezza rischio fuga Alzheimer, per la protezione di ospiti con demenza e soggetti a wandering.

Due accessi da presidiare.

Evitare falsi allarmi nel caso in cui l'ospite monitorato venga accompagnato nei suoi spostamenti da personale autorizzato.

Soluzione

Sistema senza fili Localizza (Bosch), con trasmettitori-localizzatori a bracciale (S37L) per gli ospiti da monitorare.

Ai 2 varchi da presidiare, segnalatori ad antenna a fianco delle porte rilevano l'avvicinarsi e il passaggio degli ospiti muniti di bracciale S37L, lanciando un allarme immediato alla centrale Nurse-Call con i dati identificativi e di posizione.


Il trasmettitore S37E per accompagnatori evita falsi allarmi: quando il sistema ne rileva la presenza in concomitanza con il passaggio dell'ospite che indossa il localizzatore, si annulla l'invio di un allarme varchi.

Vantaggi

Razionalità e tempi brevi

Il sistema si installa in tempi rapidi e può essere dimensionato come serve, avendo sempre la possibilità di ulteriori espansioni secondo necessità.

Il dispositivo per gli accompagnatori elimina il fastidioso inconveniente di allarmi superflui e conseguenti perdite di tempo per lo staff.

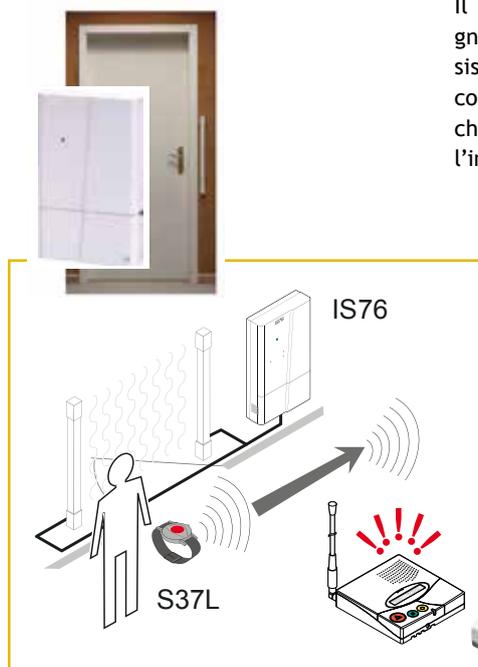

Schema di funzionamento del sistema Localizza con segnalatore ad antenna IS76 e unità master NurseCall



Trasmettitore-localizzatore S37L (ospite)



Trasmettitore di accompagnamento S37E (staff)